

Behandelwijzer



Aanbrengen van V.A.C.® Therapy



- Reinig en droog de huid rondom de wond
 - Breng eventueel een barrièrefilm aan
 - Het spiraalvormige V.A.C.® GranuFoam™ kan gemakkelijk op maat worden gebracht, u hebt geen schaar nodig
- Let op: Het verband mag de wondranden niet bedekken!**



- Knip de folie op maat en desgewenst in kleinere stroken
- Verwijder de witte bescherm laag aan de achterzijde (laag 1) en breng de folie (dakpansgewijs) aan
- Verwijder laag 2
- Breng de folie met een overlap van 3 tot 5 cm op de intacte huid aan **Let op: niet te strak aanbrengen!**



- Trek met duim en wijsvinger de folie in het midden iets los van de foam
- Knip hierin een ronde opening ter grootte van een 2 euro munt
- Breng de SensaT.R.A.C.™ Pad rechtstreeks aan op de opening in de folie
- Sluit door middel van de bajonetsluiting de connector van de SensaT.R.A.C.™ Pad op de opvangbeker aan
- Start de therapie (zie evt. gebruikershandleiding)

V.A.C.® Therapy (Vacuum Assisted Closure®) is een niet-invasief en actief wondbehandelingssysteem. De therapie oefent een gecontroleerde en nauwkeurige negatieve druk uit op de plaats van de wond.


Indicaties

- Diabetische voetwonden
- Ulcus cruris (open been)
- Decubituswonden
- Dehiscente wonden
- Transplantaten
- Traumawonden
- Abdominale wonden

Contra-indicaties


- Blootliggende bloedvaten en/of organen
- Maligne weefsel
- Necrose
- Niet-enterale en/of ongeëxploreerde fistels
- Actieve bloedingen
- Onbehandelde osteomyelitis

Foamtypen

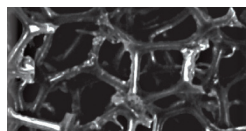


V.A.C.® GRANUFOAM™ DRESSING

STIMULEERT GRANULATIEWEEFSEL
Bevordert de verwijdering van exsudaat – hydrofoob met open poriën. Zorgt voor een gelijke verdeling van negatieve druk. Vormt zich naar de contouren van diepe en onregelmatige wond en – flexibel design.

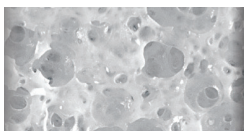

V.A.C.® WHITEFOAM DRESSING

BESCHERMT KWETSBAAR WEEFSEL
Ideaal voor wonden met tunnels of ondermijningen – hoge treksterkte. Bevordert aanslaan van grafts en flaps – niet verklevend materiaal voor een comfortabele verbandwissel.

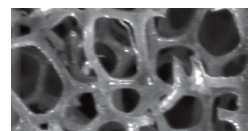

V.A.C.® GRANUFOAM SILVER® DRESSING

ANTIMICROBIEEL
Snelle en effectieve microbiële vernietiging – continue afgifte van zilverionen aan het wondbed.

Wanneer continue of intermitterende therapie?

Continu	Intermitterend
Deze instelling wordt voor de eerste 48 uur voor alle wonden aanbevolen. Het belangrijkste doel is om de wond te reinigen.	Deze instelling wordt met name toegepast als groei van granulatieweefsel hét belangrijkste doel is. Intermitterende therapie kan zorgen voor een extra groei van granulatieweefsel. Gebruik géén intermitterende therapie in de reinigingsfase.
Standaard instelling: Continu 125 mmHg	Standaard instelling: Intermitterend 125 mmHg, 5 minuten aan, 2 minuten uit.

Waarom SensaT.R.A.C.™ Technologie?

Beweging van wondvocht tegen de zwaartekracht in, evenals viscositeit van het exsudaat in de slang, beïnvloeden de toediening van negatieve druk. Alleen SensaT.R.A.C.™ compenseert drukafwijkingen ter hoogte van de wond veroorzaakt door de positie en beweging van de patiënt en kenmerken van het exsudaat. Het geïntegreerde V.A.C.® Therapy Systeem is het enige NPWT systeem dat de negatieve druk ter hoogte van de wond kan monitoren en aanpassen aan de ingestelde druk.



Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support
+31 (0) 30 635 60 60



KCI Medical B.V.
Postbus 217
3990 GA Houten